




Conéctese

Aplicacione Beltone HearMax™

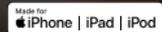

Introducción

Gracias por elegir nuestros productos. Creamos esta aplicación para facilitarle el uso y el control de sus audífonos desde su teléfono inteligente o dispositivo móvil.

Para obtener información sobre qué teléfonos inteligentes y dispositivos móviles son compatibles con la aplicación, visite: beltone.com/compatibility.



Antes de que pueda comenzar a usar la aplicación, debe sincronizar su teléfono inteligente o dispositivo móvil con sus audífonos. Es fácil de hacer, solamente siga los pasos siguientes.

Cómo emparejar sus audífonos con su dispositivo iOS* (Las instrucciones reflejan el flujo de emparejamiento para iOS 13 o posterior)


1. Apague los audífonos.
2. Confirme que esté activado **Bluetooth** en el menú **Configuración** de su dispositivo iOS. La barra de deslizamiento se pone verde cuando activa Bluetooth.

*Para emparejar Beltone Rely 2 con iOS, siga los pasos para emparejar con Android



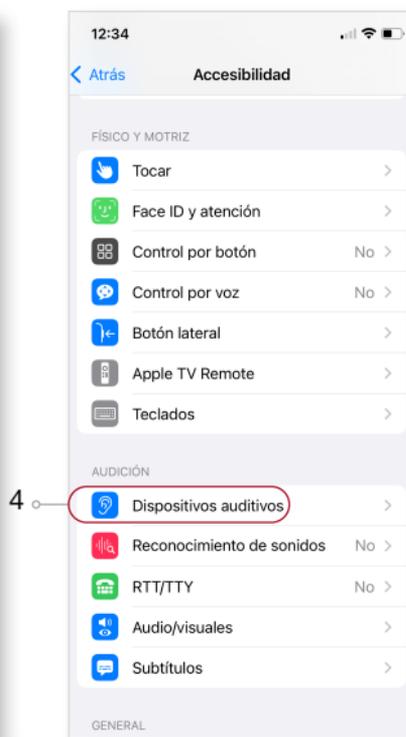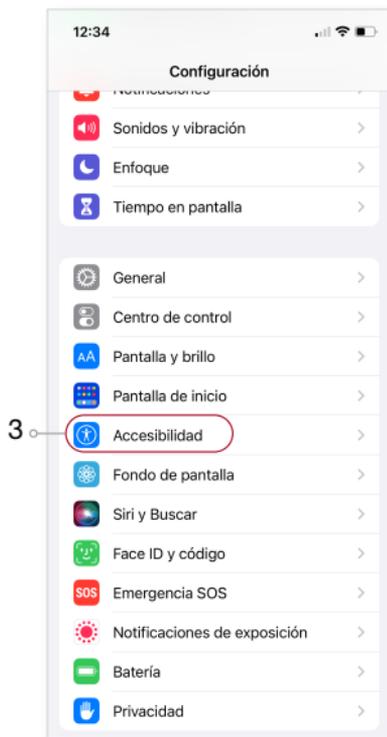

3. Regrese al menú principal de **Configuración** y después, pulse en **Accesibilidad**.
4. Desplácese hasta **Dispositivos auditivos**.
5. Encienda sus audífonos. Ahora, su dispositivo iOS podrá detectar sus audífonos.

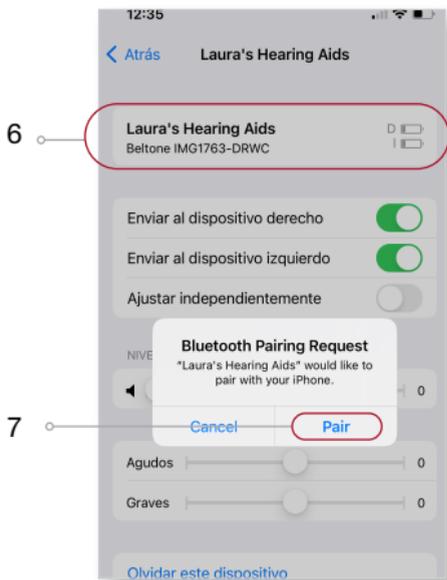

- Una vez conectados, seleccione sus audífonos en Dispositivos auditivos.
- Pulse en **Sincronizar**.
- Vaya a **App Store** y en el campo de **Búsqueda** en la parte superior escriba el nombre de la aplicación.
- Descargue la aplicación, ábrala y pulse **Comenzar**. Siga las instrucciones en pantalla para conectar la aplicación.
- Ya está listo para disfrutar.

Si necesita sincronizar de nuevo su dispositivo iOS

- Comience por eliminar la sincronización anterior en el menú **Configuración**.
- Pulse **Accesibilidad**.
- Seleccione **Dispositivos auditivos** y pulse **Olvidar este dispositivo**.
- Apague y encienda de nuevo su dispositivo iOS y sincronice de nuevo los audífonos con su dispositivo. Si necesita más información, comuníquese con su profesional de audífonos.

Llamadas manos libres para usuarios de Beltone Imagine™ compatibles Dispositivos Apple*

Si tiene audífonos Beltone Imagine con dispositivos Apple compatibles, sus audífonos se convertirán en un auricular manos libres de manera predeterminada una vez que se emparejen con los dispositivos Apple.

Cómo tomar/finalizar llamadas:

- Presione brevemente el botón de su audífono (cualquiera de los lados) o use su iPhone o iPad.

Cómo rechazar/ignorar llamadas:

- Mantenga presionado el botón de su audífono (cualquiera de los lados) o use su iPhone o iPad.

Cuando reciba otra llamada mientras está hablando por teléfono, simplemente siga las instrucciones anteriores.

Nota: Si se rechaza la llamada entrante, vuelve automáticamente a la primera/anterior llamada.

Cómo cambiar el volumen de las llamadas:

- Utilice los botones de subir y bajar el volumen de su iPhone o iPad.





*Las llamadas manos libres son compatibles con iPhone 11 o posterior, iPad Pro de 12,9 pulgadas (5.ª generación), iPad Pro de 11 pulgadas (3.ª generación), iPad Air (4.ª generación) y iPad mini (6.ª generación) con actualizaciones de software iOS 15.3.1 y iPadOS 15.3.1 o posterior.

Cómo deshabilitar las llamadas manos libres:



1. Haga triple clic en el botón pulsador del iPhone o del iPad para acceder a la configuración del audífono de iOS.
2. Desplácese hacia abajo y seleccione "Opciones de entrada".
3. Seleccione "Desactivar".

Cómo emparejar sus audífonos con su dispositivo Android™*

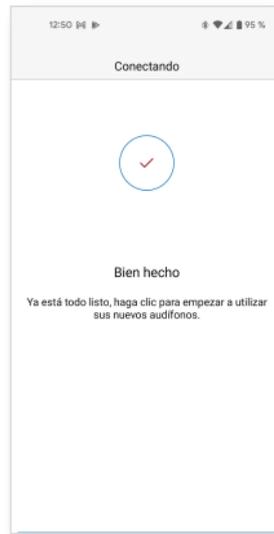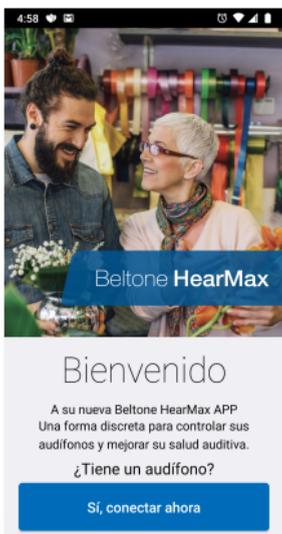

1. Descargue la aplicación Beltone HearMax, ábrala y toque **Sí, conéctese ahora**.
2. Si se le solicita, proporcione acceso a la ubicación de su dispositivo móvil seleccionando **Permitir**.
3. La aplicación lo guiará a través del proceso. Reinicie sus audífonos según sea necesario apagándolos y encendiéndolos nuevamente, siguiendo los pasos descritos en la aplicación.
4. La sincronización se ha completado.

NOTA: Si ya ha sincronizado los audífonos, debe desvincularlos en el menú Bluetooth de su teléfono antes de volver a sincronizarlos.

*Estas instrucciones también son aplicables para emparejar Beltone Rely 2 con un dispositivo iOS compatible



Fabricado conforme a la FDA:

Beltone

8001 E Bloomington Freeway

Bloomington, MN 55420

USA

1-800-BELTONE

beltone.com

© 2022 GN Hearing A/S. Todos los derechos reservados. Beltone es una marca registrada de GN Hearing A/S. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en Estados Unidos y otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google LLC. La palabra y los logotipos de la marca Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.