

Aplicaciones Beltone guía del usuario



Introducción


Las aplicaciones de Beltone están hechas para mejorar su experiencia auditiva y le permiten obtener más provecho de sus audífonos Beltone.

La innovadora tecnología auditiva de Beltone, su sonido y diseño, combinado con la programación de dispositivos personalizada por su audioprotesista, hará que oír sea una experiencia más agradable.

Las aplicaciones de Beltone le permiten obtener más provecho de sus audífonos Beltone y le proporcionan nuevos medios para aumentar el control, la personalización y el alivio.

Para más información y ayuda sobre las aplicaciones, visite el sitio web:
www.beltone-hearing.com/apps

Si desea una versión impresa de la guía del usuario de una aplicación, consulte a nuestro servicio de atención al cliente o, simplemente, imprima esta guía del usuario.

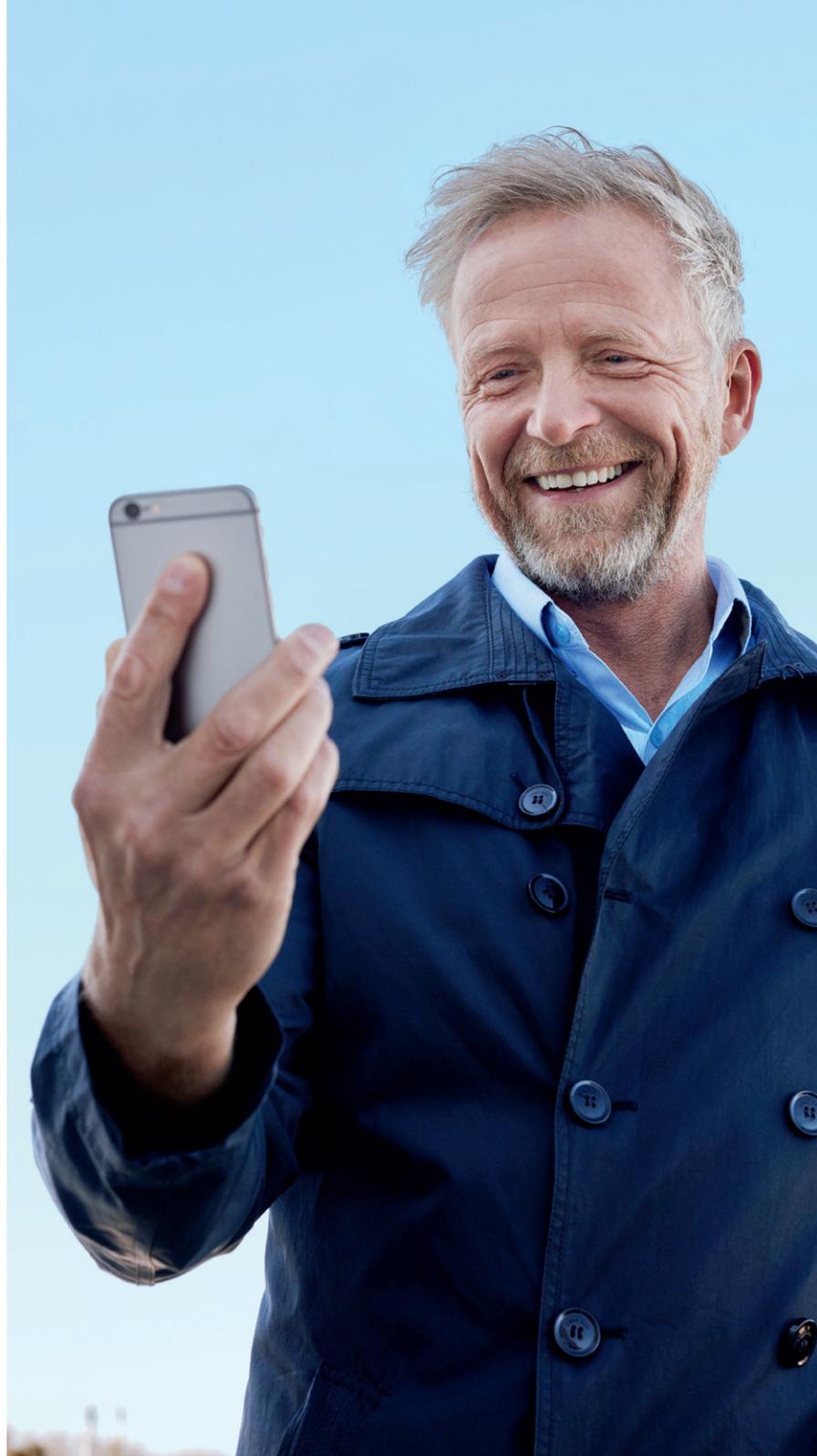

Búsqueda e instalación de la aplicación



Acceda a las aplicaciones para iPhone, iPad e iPod touch: descargue desde App Store siguiendo estos pasos:

1. Acceda a App Store pulsando sobre el icono App Store  en los dispositivos iPhone, iPad o iPod touch
2. En App Store, busque “Beltone” y el nombre de la aplicación
3. Si utiliza un iPad, cambie el criterio de búsqueda en la esquina superior izquierda a “solo iPhone”
4. Tras localizar la aplicación, pulse en “Descargar”
5. A continuación, toque “Instalar”
6. Introduzca un Apple ID y la contraseña
7. Tras introducir la contraseña la aplicación Beltone comenzará a descargarse
8. Después de descargar, encontrará la aplicación en la pantalla del dispositivo móvil: tóquela para abrir la aplicación de Beltone



Acceda a las aplicaciones para dispositivos Android. Descárguelas desde Google Play siguiendo estos pasos:

1. Entre en Google Play tocando el icono de Play Store  en su teléfono Android.
2. En Google Play, busque “Beltone” y el nombre de la aplicación
3. Después de encontrar la aplicación, toque “Install” y, a continuación, “Aceptar” para permitir que la aplicación acceda a ciertas funciones de su teléfono, como Bluetooth
4. Tras introducir la contraseña la aplicación Beltone comenzará a descargarse
5. Cuando finalice la instalación, toque “Abrir” para abrir la aplicación Beltone

Beltone HearMax™



La aplicación Beltone HearMax ofrece una facilidad de uso sin precedentes con sólo un toque de dedo. Controle y personalice los ajustes de sus audífonos directamente desde su dispositivo móvil, para que pueda personalizar su audición según los entornos de sonido. Incluso su audioprotesista puede actualizar su audífono y recibir actualizaciones de forma remota sin desplazarse a la clínica (disponible en mercados seleccionados). La aplicación le guiará en todo lo que puede hacer y cómo hacerlo.

La aplicación Beltone HearPlus está disponible en App Store y Google Play.

Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:

Audífonos:

- Audífonos Beltone compatibles con Bluetooth 4.0 *: Beltone Trust™ o posterior.

Dispositivos móviles:

- iPhone, iPad o iPod touch. La aplicación Beltone HearMax también es compatible con Apple Watch.
- Compatibilidad con dispositivos Android.


Visite nuestro sitio web para obtener información específica y una lista actualizada de dispositivos móviles compatibles:

www.beltone-hearing.com/compatibility

*Asegúrese de que los audífonos disponen de la última versión de firmware. Si no es así, su audioprotesista puede actualizar el firmware del audífono.



Funciones de la aplicación Beltone HearMax

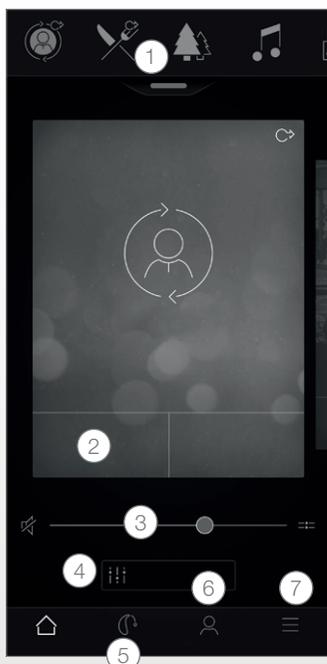

Pantalla principal:

1. Use el carrusel superior, el **desplegable** o pase la tarjeta para elegir su audífono, programa de transmisión o Favorito. Pulsar el desplegable para modificar programas y Favoritos.
2. Usar los **botones de acceso rápido** para acceder a los ajustes de sonido avanzados con un toque.
3. Ajustar el **volumen** o silenciar.
4. Acceder a **Sound Enhancer** para ajustar agudos, medios y bajos, reducir el ruido, enfocar la voz o reducir el ruido del viento*. También tiene acceso a Tinnitus Manager para ajustar el tono y la variación del sonido de Tinnitus Breaker Pro, o para elegir su Nature Sound**.
5. **Menú de navegación.**
6. El menú **“My”** (Mi). Aquí puede **aprender lo que puede hacer la** aplicación y ponerse en contacto con su **audioprotesista* para solicitar ayuda y recibir actualizaciones de la configuración de su audífono.**
7. El menú **“More”** (Más). Aquí puede ajustar la configuración de la aplicación y encontrar información adicional en su aplicación.

*La disponibilidad de las funciones depende del modelo de audífono y del ajuste realizado por su audioprotesista.

**Disponible si la función Tinnitus Breaker Pro ha sido activada por su audioprotesista.

Uso previsto de las aplicaciones para dispositivos móviles:

Las aplicaciones para dispositivos móviles están diseñadas para audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos para los que las aplicaciones han sido desarrolladas.

CE
0297

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca

Cualquier cuestión relacionada con la Directiva de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE debe dirigirse a Beltone A/S, Dinamarca.

Aplicación Beltone HearPlus™



La aplicación Beltone HearPlus ofrece la misma interfaz intuitiva que proporciona HearMax para controlar y hacer ajustes en sus audífonos. Esta aplicación se conecta a los audífonos Beltone, que no son compatibles con Beltone Remote Care.

La aplicación Beltone HearPlus está disponible en App Store y Google Play.

Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:

Audífonos:

- Audífonos Beltone compatibles con Bluetooth 4.0 *: Beltone Legend, Beltone First, Beltone Boost y Beltone Boost Plus.

Dispositivos móviles:

- iPhone, iPad o iPod touch. La aplicación Beltone HearPlus también es compatible con Apple Watch.
- Compatibilidad con dispositivos Android.

Visite nuestro sitio web para obtener información específica y una lista actualizada de los dispositivos móviles compatibles:

www.beltone-hearing.com/compatibility

*Asegúrese de que los audífonos disponen de la última versión de firmware. Si no es así, su audioprotesista también puede actualizar el firmware del audífono.

Uso previsto de las aplicaciones para dispositivos móviles:

Las aplicaciones para dispositivos móviles están diseñadas para audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos para los que las aplicaciones han sido desarrolladas.



0297

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca

Cualquier cuestión relacionada con la Directiva de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE debe dirigirse a Beltone A/S, Dinamarca.



Beltone SmartRemote™



La aplicación Beltone SmartRemote permite controlar los audífonos. Junto con Beltone Direct Phone Link 2, Beltone SmartRemote le permite utilizar su dispositivo móvil para obtener fácilmente una visión general y controlar a distancia los audífonos inalámbricos Beltone y los accesorios inalámbricos Beltone Direct Line.

La aplicación Beltone SmartRemote está disponible en App Store y Google Play.

Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:

Audífonos:

- Audífonos inalámbricos Beltone.

Accesorio inalámbrico:

- Manos Libres Beltone Direct Phone Link 2.

Dispositivos móviles:

- iPhone, iPad o iPod touch con iOS 7 o posterior.
- Dispositivos Android* con Android OS 2.3.5 o posterior.

Para obtener el mejor rendimiento, la aplicación Beltone SmartRemote no debe utilizarse activamente en más de un dispositivo móvil a la vez.

Para más información, visite

www.beltone-hearing.com/smartremoteapp

*Funcionalidad comprobada en modelos seleccionados de HTC, Huawei, LG, Motorola, Samsung y Sony.



Funciones de la aplicación Beltone SmartRemote



1. **Ajustar o** silenciar el volumen en los audífonos inalámbricos.
Ajustar o silenciar el volumen de los accesorios inalámbricos.
2. Pantalla de enlace para ver las conexiones to overview connections entre la aplicación y los audífonos.
3. Cambiar programas manuales y del transmisor.

Uso previsto de las aplicaciones para dispositivos móviles:

Las aplicaciones para dispositivos móviles están diseñadas para audífonos inalámbricos. Las aplicaciones para dispositivos móviles envían y reciben señales de los audífonos inalámbricos a través de los dispositivos para los que las aplicaciones han sido desarrolladas.

CE
0297

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca

Cualquier cuestión relacionada con la Directiva de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE debe dirigirse a Beltone A/S, Dinamarca.

Aplicación Beltone Calmer™



La aplicación Beltone Calmer ofrece un tratamiento equilibrado y flexible del tinnitus. Utiliza una combinación de sonidos y ejercicios relajantes destinados a distraer su cerebro de centrarse en el tinnitus. Con el tiempo, el cerebro aprende a centrarse menos en el tinnitus. Además, hay siete capacidades para ampliar los elementos de asesoramiento y terapia de la aplicación, proporcionando consejos atractivos para el tratamiento y la comprensión del tinnitus.

La aplicación es una herramienta para cualquier persona con tinnitus. Debe utilizarse en combinación con un programa o un plan de tratamiento del tinnitus establecido por un especialista.

La aplicación Beltone Tinnitus Calmer está disponible en App Store y Google Play.

Para utilizar la aplicación necesita los dispositivos siguientes:

Audífonos:

- Audífonos Beltone Bluetooth 4.0 para la transmisión directa desde iPhone, iPad o iPod touch, o audífonos inalámbricos Beltone con el accesorio Direct Phone Link 2 para la transmisión directa de audio a dispositivos Android.

Dispositivos móviles:

- iPhone, iPad o iPod touch.
- Dispositivos Android con Android OS 4.4 o posterior.


Auricular:

- También puede usar la aplicación con un auricular estándar conectado al teléfono.

Para más información, visite: www.beltone-hearing.com/tinnituscalmer



Funciones de la aplicación Beltone Calmer

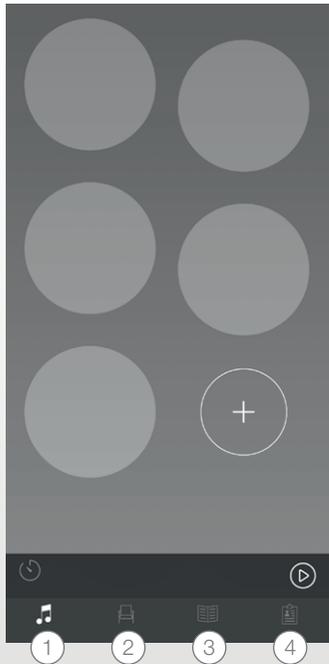

La aplicación le permite administrar su biblioteca personal de archivos de terapia y crear sus propios paisajes sonoros, desde sonidos ambientales a piezas musicales breves.

1. Terapia de sonido:

Escuche, cree y descargue paisajes sonoros.

2. Terapias:

Encuentre terapias diferentes que le ayudarán a relajarse.

3. Más información:

Encuentre información sobre el tinnitus.

4. My Calmer:

Controle el uso de la aplicación.

Uso previsto de la aplicación:

La aplicación está destinada a proporcionar terapia de sonido y ejercicios de relajación con objeto de distraer a un paciente de tinnitus de centrarse en el tinnitus. Se puede utilizar como parte de un plan de tratamiento del tinnitus. No está concebido para su uso en un tratamiento audiológico u ontológico del tinnitus sintomático ni para enmascarar ruidos internos.



Advertencia sobre el Tinnitus

Para evitar posibles pérdidas auditivas, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.



Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca

Cualquier cuestión relacionada con la Directiva de la Unión Europea sobre dispositivos médicos 93/42/CEE debe dirigirse a Beltone A/S.

Advertencias y precauciones

Uso con aplicaciones para dispositivos móviles:

Las notificaciones de actualizaciones de aplicaciones no deben desactivarse, y se recomienda que el usuario instale todas las actualizaciones de la aplicación y del sistema operativo para garantizar la máxima protección contra las vulnerabilidades.

La aplicación solo debe utilizarse con los dispositivos Beltone a los que está destinada. Beltone no se responsabiliza si la aplicación se utiliza con otros dispositivos o si se utilizan aplicaciones de terceros para controlar los dispositivos Beltone.

Aplice solo los paquetes de ajuste remoto que espera recibir en sus audífonos.

Precauciones y advertencias

Si utiliza la aplicación Beltone con el audífono, asegúrese de leer la guía del usuario del audífono. La guía del usuario del audífono se incluyó en el paquete de los audífonos. Si necesita una copia nueva, consulte con el servicio de atención al cliente de Beltone.

Preste atención a la información que contenga un símbolo de advertencia

 **ADVERTENCIA** indica una situación que podría causar lesiones de gravedad, **PRECAUCIÓN** indica una situación que podría provocar lesiones leves y moderadas.



Beltone. Ayudamos al mundo a oír mejor

Beltone fue fundada con el ánimo de ayudar a un amigo a disfrutar más de la vida. Desde 1940, hemos proporcionado conocimiento, herramientas, servicios y formación a profesionales del cuidado de personas con problemas auditivos. Beltone pone los cuidados auditivos de calidad al alcance de más personas. Para ello, desarrollamos soluciones auditivas técnicamente óptimas sin dejar de enfocarnos en las necesidades individuales. Estamos convencidos de que no se le debería negar a ninguna persona la posibilidad de mejorar su vida a través de una mejor audición.

Fabricante según la Directiva 93/42/
CEE sobre dispositivos médicos:

SEDE CENTRAL INTERNACIONAL

Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Dinamarca
Tel.: +45 4575 1111
beltone-hearing.com

CVR n° 55082715

© 2019 GN Hearing Care Corporation. Todos los derechos reservados. Beltone es una marca comercial de GN Hearing Care Corporation. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad, iPod touch y Apple Watch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en los EE.UU. y otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc. El robot de Android se reproduce y modifica de forma compartida con Google y se utiliza de acuerdo con los términos descritos en la licencia Creative Commons Attribution 3.0. La marca de la palabra Bluetooth y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

