


# Cuidado auditivo extraordinario – siempre al alcance

Beltone Remote Care ofrece ese nivel de cuidado adicional que hace que su viaje hacia una mejor audición sea más suave y sencillo, en cada paso del camino. Siendo un servicio personal ofrecido por su audioprotesista, Beltone Remote Care le permite solicitar y recibir pequeños ajustes avanzados en la configuración del audífono, donde sea que esté


utilizando la aplicación Beltone HearMax™. Como puede evitarse viajes adicionales al gabinete audiológico, Beltone Remote Care lo ayuda a optimizar su experiencia auditiva sin perder el ritmo de su vida diaria.




Descargue la aplicación Beltone HearMax de App Store o Google Play. Vaya a "Mi Beltone".

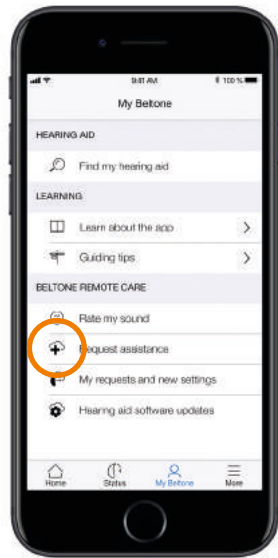


Solicite un ajuste de configuración a distancia mediante el uso del cuestionario predefinido en la aplicación y presione enviar.

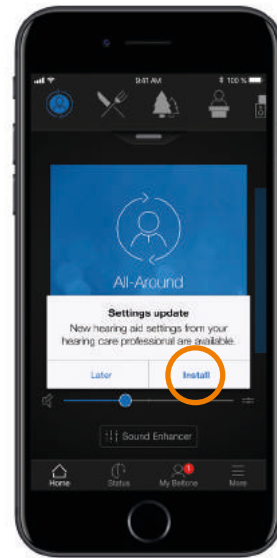

Cuando los nuevos ajustes estén listos para descargarse, recibirá una notificación. Presione 'Instalar'.

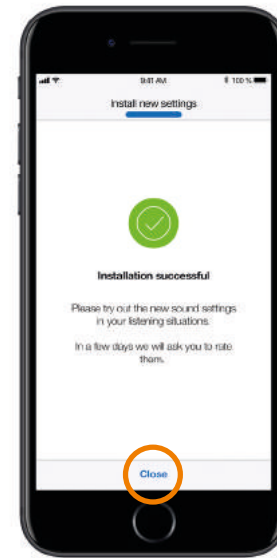

La nueva configuración será transferida directamente a los audífonos. Eso es todo.

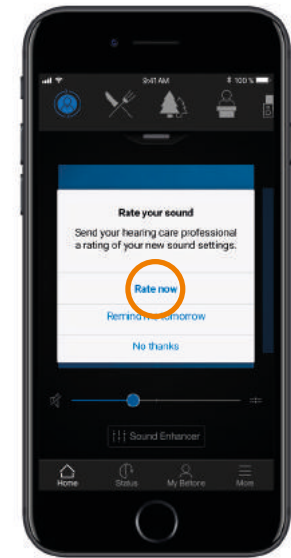

Tras haber probado la nueva configuración, puede calificarla directamente en la aplicación.



Ve todos los tutoriales de uso en [www.beltone-hearing](http://www.beltone-hearing).

© 2018 GN Hearing Care Corporation. Todos los derechos reservados. Beltone es una marca registrada de GN Hearing Care Corporation. Apple, el logotipo de Apple y iPhone, son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.



## Beltone Remote Care es tan fácil como contar hasta 3



**1** Usted solicita asistencia a través de la aplicación HearMax.



**2** Su audioprotesista revisa y envía la nueva configuración de vuelta a la aplicación.



**3** Toque la pantalla de la aplicación para aceptar la actualización. Puede además calificar en la aplicación la nueva configuración.