

Cómo emparejar sus audífonos con su dispositivo Android™

1. Vaya a **Google Play**. En el campo **Buscar** en la parte superior, introduzca el nombre de la aplicación y descárguela.
2. Una vez descargada, abra la aplicación y toque **Comenzar**.
3. **Siga las instrucciones en la pantalla para conectarse y ¡listo!**.

NOTA: Si anteriormente había vinculado algún audífono, debe desvincularlo en el menú **Bluetooth** del teléfono smartphone antes de realizar una nueva vinculación.

Si necesita volver a emparejar su dispositivo iOS

1. Comience eliminando el emparejamiento anterior yendo al menú **Ajustes**.
2. Baje en la pantalla hasta encontrar y seleccionar **Accesibilidad**.
3. Seleccione Dispositivos de audio
4. Pulse sobre el nombre de sus audífonos, desplácese hacia abajo y seleccione Olvidar este audífono.
5. Apague y vuelva a encender su dispositivo iOS y vuelva a emparejar los audífonos con el dispositivo. Si necesita mas información, contacte con su audioprotesista.

Fabricante
Beltone A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup, Denmark
Tel.: +45 45 75 11 11
beltone.com

CVR no. 55082715



© 2019 GN Hearing Care Corporation. Todos los derechos reservados. Beltone es una marca registrada de GN Hearing Care Corporation. Apple, el logotipo de Apple, iPhone, iPad y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y otros países.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc., registrada en EE.UU. y otros países. Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google LLC. La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

M201464ES-19.08-Rev



Guía rápida de conexión

Aplicaciones Beltone HearMax™ y Beltone HearPlus™

Beltone.com

Made for
iPhone | iPad | iPod


Introducción

Gracias por elegir nuestros productos. Hemos creado esta aplicación para que resulte para usted fácil y agradable de utilizar y controlar los audífonos desde su teléfono o dispositivo móvil. Para obtener información sobre qué teléfonos y dispositivos móviles son compatibles con la aplicación, visite: beltone.es/compatibilidad


Antes de que pueda comenzar a utilizar la aplicación, debe vincular su teléfono o dispositivo móvil con los audífonos. Es muy sencillo, solo hay que seguir los siguientes pasos.

Cómo emparejar los audífonos con su dispositivo iOS

1. Apague los audífonos.
2. Active **Bluetooth®** yendo al menú **Ajustes** en su dispositivo iOS. El control deslizante se vuelve verde al activar Bluetooth.

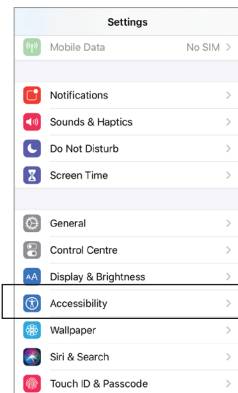


3

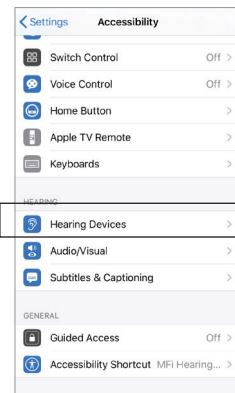

4

Nota: a partir de iOS 13 y versiones posteriores.

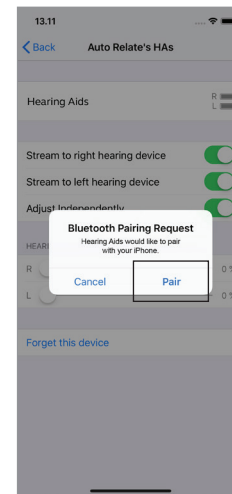

6

6. Pulse sobre **Emparejar**.
7. Vaya a **App Store** y en el campo de búsqueda en la parte superior introduzca el nombre de la aplicación.
8. Descargue la aplicación, ábrala y pulse **Comenzar**.
9. Siga las instrucciones en la pantalla para conectarse a la aplicación y ¡listo!.

3. Vuelva al menú principal de **Ajustes** y seleccione **Accesibilidad**.
4. Baje por la pantalla hasta encontrar **Compatibilidad con audífonos**.

5. Encienda los audífonos. Ahora su dispositivo iOS podrá detectar los audífonos.

